

## Einfache Schritte führen zum richtigen Testergebnis! Schülerselbsttest im Klassenverband

Schritt	Was ist zu tun?	Material
1	Hände waschen (S) und Arbeitsplatz desinfizieren (L)	Hand- und Tischdesinfektion
2	Testphiole mit Kappe, Schnelltest und Teststab werden vom LehrerIn ausgeteilt	Testset SARS-CoV-2 9901-NCOV-01G
3	Testphiole mit Wäscheklammer fixieren und Deckel abziehen	Wäscheklammer
4	Teststab aus der Verpackung nehmen und in die Nase einführen - ca. 2 cm - 3-4 mal drehen und gegen Nasenwand drücken	Teststab
5	Teststab in die Testphiole einführen und mindestens 5 Mal drehen – am zusammengepressten Rand abstreifen	
6	Teststab in die Verpackung zurückstecken - Kappe auf die Testphiole pressen	
7	Schnelltest aus der Verpackung nehmen – Platznummer auf den Test schreiben – vier Tropfen auf die Testfläche tropfen lassen – ca 1 Minute warten	Schnelltest
8	Schnelltest auf die Klassentestmappe/Platznummer legen	
9	Testphiole und Teststab entsorgen – Klassenzippbeutel Hände waschen (S) und Arbeitsplatz desinfizieren (L)	Zippbeutel
10	LehrerIn überprüft nach 15 bis 30 Minuten das Testergebnis	Stoppuhr

